

ESTERILIZADORES

- *Antes de ligar o esterilizador, verificar a tensão na etiqueta que se encontra no painel ou quando com termostato de baixo dele , também verificar a tomada aonde será ligada.*
- *Antes de ligar o aparelho, coloque água .*
- *Quando com termostato colocar na temperatura desejada*
- *Sempre que atingir a temperatura desejada o termostato ira desligar apagando a lâmpada piloto, quando acessa estará em funcionamento.*
- *Quando sem termostato a peça fica ligada direta sendo preciso desligar da tomada quando estiver fervendo.*
- *A limpeza do esterilizador e dos bules devera ser feita com água e sabão, para a parte de externa do esterilizador devera ser feita com um pano com álcool, sempre com o aparelho desligado.*